

Auto contraste    A+    Aumentar Fonte    A-    Diminuir Fonte



Loja Oficial

Encontre um produto



**Pinça Cheron Descartável**

★★★★☆ ( 3 Avaliações )

A partir de: **R\$ 73**

**COMPRAR**



[Ver mais formas de pagamento](#) >

Estéril - 30 Unid.

- 0 +

De:R\$ 81,00

Por:

**R\$ 73**

R\$ 2,43/unid.

De:R\$ 106,00



Loja Oficial



R\$ 1,92/unid.

COMPRE JUNTO

-9%

Você está vendo

Pinça Cheron...

De R\$ 106,00

**Por R\$ 96,00**

Selecione o tamanho

+

Espéculo Vaginal...

**Por R\$ 342,00**

Selecione o tamanho

+

Rack de Ponteira...

**Por R\$ 19,90**

=

Compre os 3 produtos

De R\$ 467,90

**Por R\$ 457,90**

COMPRAR JUNTO

Descrição

Características Técnicas

Instruções de Uso

Descrição

AJUDA



COMPRAR

Descrição

Pinça Cheron descartável indicada para higienização e antissepsia do canal vaginal e/ou de outra região corporal.

no mesmo modelo e para o mesmo uso proposto para versão metálica, permite economia com o

☐ 

Loja Oficial

☐

☐

☐

nao esteri.

Características Técnicas

Características técnicas

instrumental atóxico, com sistemas de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi- aguda

Matéria prima: Resina de engenharia

Dimensões

Comprimento total 245mm

Código Produto

PINÇA CHERON COMUM 10.1381  
PINÇA CHERON ESTÉRIL CK3

Apresentação Comercial

Pinça Cheron descartável Comum 50 unid.



 COMPRAR

Pinça Cheron descartável Estéril 30 unid.

## Instruções de Uso



Loja Oficial   

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização da higienização e/ou antissepsia do canal vaginal ou outra região corporal.

### Advertência e precauções


- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Não há contraindicações conhecidas

### Prazo de Validade

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

## AVALIAÇÕES


*O que os clientes estão falando sobre o produto*

Média de avaliações  
 4.5  
(3 avaliações)



Recomendam este produto

 [COMPRAR](#)

ordenar por:  
[SELECIONE](#) [AJUDA](#) 

★★★★★

4 meses atrás

Loja Oficial

compra verificada

✓

Sim, recomendaria a um amigo

(0)

(0)

COMPARTILHAR

▼

Junio

★★★★★

5 meses atrás

Produto excelente! Serve ao que se presta uso ginecológico, porém, uso pra acessar escara sacral cavitária grau IV e efetuar a troca de curativos. Recomendo.

compra verificada

✓

Sim, recomendaria a um amigo

(0)

(0)

COMPARTILHAR

▼

Marcelo S.

★★★★★

7 meses atrás

Produto comprado para uso na ginecologia da clinica atende as expectativas.

compra verificada

✓

Sim, recomendaria a um amigo

(0)

(0)

COMPARTILHAR

▼

ESCREVER AVALIAÇÃO

DÚVIDAS

Pergunte ou consulte a dúvida de outros clientes!

Faça uma pergunta ao lojista ou à outros compradores

AJUDA

https://loja.kolplast.com.br/pinca-cheron-descartavel/p?idsku=2000021

5/7

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

ENVIAR DÚVIDA

Loja Oficial

SEUS VOTOS RELEVAM PARA OS SEUS INTERESSES

A  
D

Por  
R\$ 221

VER P

Retosigmoidoscópio  
Descartável Caixa com 25..

Por R\$ 350,00

★★★★★ ( 1 )

ADICIONAR AO CARRINHO

Combo Anuscópio +  
Retosigmoidoscópio Caixa..

De R\$ 576,00

Por R\$ 547,00

★★★★★ ( 1 )

ADICIONAR AO CARRINHO

Bor  
Pa

AC

ATENDIMENTO

- Central de Atendimento
- Política de Privacidade
- Dúvidas Frequentes
- Regulamentos
- Trocas e devoluções
- Formas de Pagamento
- Política de Entrega
- Meus Pedidos
- Black Friday
- Assistência Técnica

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (11) 4961-0900  
Whatsapp (11) 95045-6509  
E-mail: sac@kolplast.com.br

 COMPRAR

AJUDA



Loja Oficial



 COMPRAR