

DESCRIÇÃO

A caneta padrão de baixa – Ref. CPB-100, é para uso em bisturis eletrônicos Transmai, onde a tensão de pico não exceda a 2kV.

INSTRUÇÕES DE USO

- Esterilizar antes de usar.
- Encaixar na saída ativo do bisturi.
- Mantenha o cabo da placa neutra e do eletrodo ativo mais curto possível e sem entrar em contato com o cabo de ECG.
- Nunca conecte ou desconecte a caneta do bisturi puxando pelo cabo, sempre puxe pelo conector.
- Verificar a conexão, integridade do cabo, conector e funcionamento do bisturi antes de sua utilização.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Não use óxido de etileno .
- Desconecte a caneta antes da limpeza, desinfecção ou esterilização.
- Desinfete utilizando produtos específicos para esta aplicação, tais como: álcool isopropílico (sangues e tecidos), detergentes enzimáticos (sangues e tecidos), utilizando sempre um pano macio, não utilizar materiais abrasivos.
- Ao utilizar produtos inflamáveis para desinfecção e esterilização, remova o excesso com pano úmido (líquido não inflamável) e limpe até ter tenha certeza que esteja seco.
- Esterilização pode ser feita em autoclave ($130 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 20 minutos) .



Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela

CEP.: 04180-010 - São Paulo SP

Fone: (0^{vv}11) 2335.1000

Fax: ramal 210

Manual do Usuário

CPB-100 - Rev. 0

03/05

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Substitua imediatamente se houver suspeita falhas ou defeitos na caneta, cabo ou conector.
- Quando da monitoração com eletrodos de ECG, deve-se tomar cuidado em aplicação na região coronária.
- Caso não for utilizar a caneta, não conectar ao bisturi. Caso não for utilizar temporariamente colocar em um recipiente isolado para evitar queimaduras devido a uma operação incorreta.
- Ao utilizar o bisturi com outros equipamentos que monitoram o paciente, verificar se todos são isolados e atendem as normas NBR aplicáveis ao equipamento, caso não sejam pode provocar queimaduras no paciente
- O operador deve evitar o contato entre partes do corpo do paciente, tal como a pele exposta da cabeça ou membros, fluidos condutivos como gel, sangue ou salinos e objetos metálicos como uma armação do leito ou maca ou superfícies que podem prover caminhos inesperados para a corrente,
- Não utilizar na presença de gases anestésicos inflamáveis.
- Ler sempre o manual do usuário do bisturi para maiores informações, sobre a utilização dos acessórios e do próprio bisturi.
- Os fabricantes que utilizarem a caneta padrão de baixa – ref. CPB-100 em seus produtos são responsáveis pela comprovação, da eficácia e funcionamento correto do sensor em seus produtos.



Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela

CEP.: 04180-010 - São Paulo SP

Fone: (0^{vv}11) 2335.1000

Fax: ramal 210

Manual do Usuário

CPB-100 - Rev. 0

03/05