



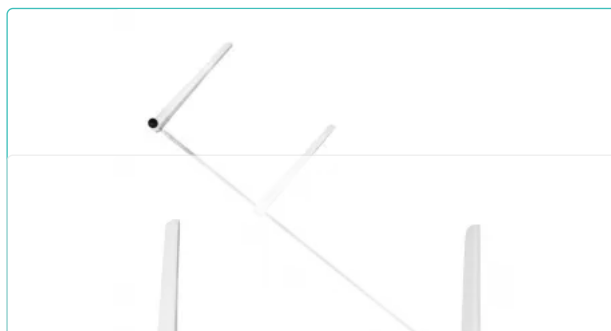

Home / EQUIPAMENTO HOSPITALAR / Infantômetro Portatil Horizontal Welmy

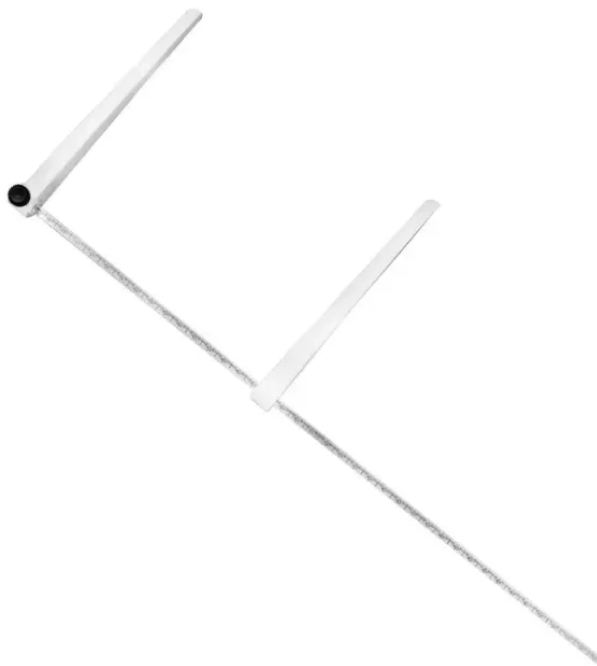

Infantômetro Portatil Horizontal Welmy

Marca: WELMY Disponibilidade: Disponível em 1 dias Referência: 2700-PC

[Seja o primeiro a opinar](#)

8 Pessoas estão vendo este produto agora

Disponibilidade: Disponível em 1 dias

R\$ 296,50

R\$ 275,75 no Pix

ou **5x** de **R\$ 59,30** Sem juros

- 1 +

COMPRAR

[Comprar pelo Whats](#)



 Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral

INFANTÔMETRO PORTATIL HORIZONTAL WELMY

Infantômetro horizontal portátil em alumínio para medir crianças, com paquímetros deslizadores WELMY.

Indicações: Utilizado para medir a altura de bebês e crianças até 102 cm. Indicado para aferir a estatura de forma prática e eficiente em clínicas, maternidades, consultórios e saúde pública, em geral.

Diferenciais e benefícios:

- Acompanhar a evolução de bebês e crianças com total precisão;
- Para uso em clínicas, consultórios e saúde pública;
- Uso portátil, dispensa qualquer tipo de instalação;
- Estrutura em alumínio anodizado;
- Resolução em milímetros;
- Intervalos de 5 mm;
- Tolerância +/- 5 mm.

Modo de Usar:

01. Encaixar o braço superior (fixo) até o início da gravação do perfil, com a face sem gravação voltada para baixo, em seguida rosquear o botão no braço superior;
02. Encaixar o braço inferior (móvel) no final da gravação indicada no perfil de modo que fique paralelo com o braço fixo, verificar se o mesmo está deslizando;
03. Após o encaixe dos itens conforme descrito acima, basta executar a medição desejada, e nos casos de transporte realizar a desmontagem e remontagem conforme necessidade.

Itens inclusos:

01. Perfil do metro infantômetro gravado;
02. Botão do metro;
03. Braço móvel do infantômetro;
04. Braço fixo do infantômetro.

Higiene e Conservação:

- Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e protegido da luz do sol;
- Evitar o contato com umidade excessiva;
- Lavar com pano umedecido com água ou álcool antes e após sua utilização.

Garantia 3 meses

Garantia

Formas de Pagamento

